

Sept. 2013

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV BANO BADRUMSKONCEPT

Optimalt samspel mellan användaren och vårdpersonal



DESIGNED FOR CARE



Här följer information om alla de olika alternativen för att använda Bano badrumskoncept optimalt, både gällande användare och vårdpersonal. I detta badrumskoncept är placeringen av de olika delarna noga uttänkt för att ge många olika alternativ att klara sig självständigt så länge som möjligt. Tanken är att det alltid ska finnas ett stödhandtag på lämplig plats och höjd att ta tag i.



Människans naturliga rörelsemönster utgör grunden för konceptet - att skapa en funktionell badrumsinredning. En ökad självständighet ger användaren större trygghet och självförtroende, vilket ger mer livskvalitet.

ERGONOMI




Personalen bör instruera användaren hur man förflyttar sig i badrummet självständigt. Önskemålet är att användaren använder sina resterande krafter och utnyttjar stöden som finns tillgängligt placerade. Det ökar möjlighet för självständighet. Detta ger användaren trygghet i sina förflyttningar.

För att underlätta vårdpersonalens belastning skall personalen göra en värdering av användarens resurser utifrån hans/hennes synvinkel och situation. Detta kan tas upp i vårdplanen.

Det är av största vikt att alla i personalen får informationen. En i personalstyrkan bör utses som får bära huvudansvaret och som i fortsättningen informerar övrig personal samt ny och vikarierande personal. Detta ger en bättre möjlighet att badrummet utnyttjas optimalt samt att man underlättar vårdpersonalens ergonomi genom mera självständiga användare.

FUNKTIONEN

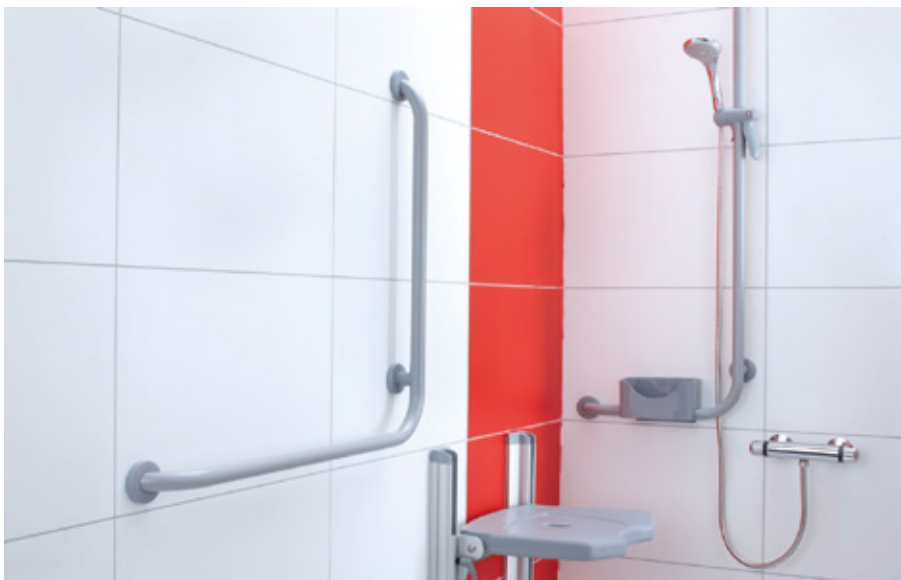

När du kommer in i badrummet finns det alltid ett stöd nära. Alla stödhandtag, WC, tvättställ och duschsits är belastningstestade och tål stora belastningar. Detta bör personalen informera användaren och de anhöriga om.

På duschsitsen sitter du tryggt då den är justerad på rätt höjd för användaren. Duschhyllan är mobil och kan placeras på lämplig plats på något utav stödhandtagen. Duschstången är kombinerat med ett stödhandtag för att undvika fallrisk.

HÖJDJUSTERING



Bano badrumskoncept ger möjlighet till höjdjustering av tvättställ, WC, WC-stödhandtag och duschsits. Höjdjusteringen skapar bästa förutsättningarna för att användaren ska bli mer självständig. WC-stolen går att höjdjustera 20 cm (41cm-61cm) manuellt med vev med demenssäkring eller med elektrisk höjdjustering.



Tvättstället går att höjdjustera på liknande sätt mellan 70-90 cm.



Höjdstyringen sker individuellt tillsammans med användaren. Då man utgår från användarens kroppsfunktion, längd och räckvidd för rörelser. WC-stödhandtag och duschsits justeras manuellt med spak med demenssäkring.



Mer information hittar du på hemsidan www.bano.se